

Påtagning av operationsrock

Ta den sterila rocken och gå till ett område där du kan öppna rocken utan risk för kontaminering.



1 Sätt båda händerna i i vecken på den hopvikta rocken. Håll rocken från kroppen och veckla ut den helt.



2 För in armarna i rockens ärmar, håll händerna i axelnivå och bort från kroppen.



3a Skall öppen teknik användas vid handskpåtagning, låt muddkanten stanna vid knogarna.
3b Vid slutet teknik, låt händerna stanna kvar i ärmen och dra in mudden från insidan.



4 Låt personen som passar på salen dra ner rocken över axlarna. Var noga med att endast vidröra insidan av rocken.



5 Fäst kardborrefixeringen i nacken. Justera till önskad passform.



6 Knyt rockens inre band.



7 Efter handskpåtagning, lossa skärpets vänstra korta ände från bältribrickan.



8 Överlämna bältribrickan till personen som passar på salen. Denna person får endast vidröra den vita delen på brickan. Vrid 3/4 varv åt vänster så att skärpets långa ände möter upp den korta.



9 Fatta skärpets långa ände, och dra försiktigt loss den från bältribrickan. Knyt ihop båda ändarna.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Sverige. Tel. 031 722 30 00. Fax 031 722 34 00.
Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är inregistrerade varumärken som tillhör Mölnlycke Health Care AB.
Copyright (2009)

Barrier®

Mölnlycke®