

## De vanligaste frågorna

### Hur kan Mepiform tona ned ärr?

Ett mjukt silikonförband gör ärrer mindre synliga. Detta visar erfarenheter efter många års användning av olika typer av förband med silikongel.

### Vilka typer av ärr kan behandlas?

Både färsk och gamla ärr som är röda och upphöjda (hypertrofiska ärr och keloider). Bröst, skulderparti och örsnibbar är känsliga områden där överdrivna ärrreaktioner kan uppstå.

### Hur lång tid tar behandlingen?

Det beror på ärrrets utseende och form. Bäst effekt uppnås så länge ärrer är röda. Om Mepiform används i förebyggande syfte är behandlingstiden ca 3 – 6 månader. Därefter kan man göra ett uppehåll. Om ärrer börjar klika, rodna och resa sig över omgivande hud bör behandlingen återupptas. En keloid bör behandlas under ca 1 år.

### Gör det ont?

Inte alls. Den mjuka Safetac® silikonytan fäster varsamt på huden och det känns knappt när du tar av och sätter på förbandet.


### Kommer ärrer att försvinna helt?

Mepiform används vid ärrbehandling på sjukhus över hela världen. Mepiform ger en avsevärd förbättring i form av mindre rodnad, klåda, sveda och upphöjning även om ärrer finns kvar.

### Kan man vistas i solen med Mepiform?

Om man utsätter ett färskt ärr för sol riskerar man att få ett missfärgat ärr. Detta kan förebyggas genom att skydda ärrer. Mepiform har solskyddsfaktor 5 men observera att det inte ger ett tillräckligt skydd.

## Detta är Mepiform

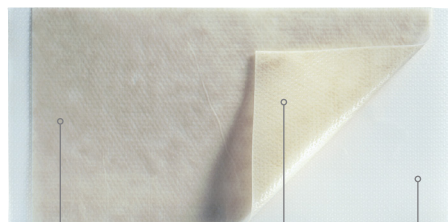

Vattentät baksida

Safetac® silikonnya

Skyddsfilm

Mepiform finns på apotek i följande storlekar:

Storlek	Antal förband	Mölnlycke Art nr
<b>5 x 7,5 cm</b>	<b>2</b>	<b>293770</b>
5 x 7,5 cm	5	293200
4 x 30 cm	5	293100
10 x 18 cm	5	293400

Mölnlycke Health Care AB  
Box 13080, 402 52 Göteborg  
Tel: 031-722 30 00. Fax: 031-722 34 01  
www.molnlycke.com



Mepiform® – behandla misspydande ärr

## Silikonförband som förstahandsval

Mepiform är ett tunt, diskret och bekvämt förband med mjuk silikonyta. Enligt internationella riktlinjer<sup>1</sup> bör förband med silikongel vara förstahandsval när det gäller att behandla ärr.


### Slätar ut, mjukar upp och tonar ned

Mepiform med Safetac® silikonyta slätar ut, mjukar upp och tonar ned röda och framträdande ärr (hypertrofiska ärr och keloider) och gör dem på så sätt mindre synliga. Dessa ärr kan ha uppkommit efter operativa ingrepp, brännskador, skärsår eller olyckshändelser. Mepiform kan också användas för att förebygga uppkomsten av överdrivna ärrreaktioner under ärrmognadsfasen (som normalt tar ca 1 år).


## Så här används Mepiform

För att förebygga ärr hos personer med ökad risk för ärrbildning bör behandling med silikonförband inledas så snart som möjligt efter det att såret har läkt. Mepiform ska sitta på 24 timmar om dygnet för att behandlingen ska bli optimal. Behandlingstiden varierar från person till person och beror också på hur ärrret ser ut. Det kan ta från tre månader och upp till ett år att behandla ett ärr.


Mepiform är självhäftande och kan klippas till lämplig storlek. Det behövs ingen ytterligare fixering för att hålla förbandet på plats. Mepiform kan sitta på vid dusch och bad, däremot bör det regelbundet tas av för rengöring och inspektion av hudområdet. Samma förband kan användas upp till två veckor.

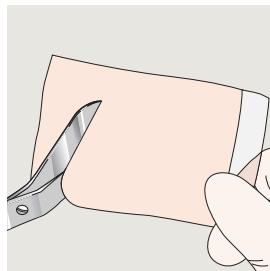

Vid behov, klipp till lämplig form och med runda hörn. Förbandet ska gå ca 1 cm utanför ärrret.

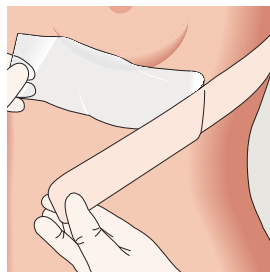

Applicera Mepiform på ärrret. Se till att huden är torr och fri från krämer o dyl.

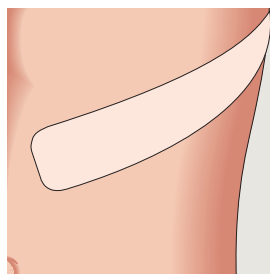

Sätt på förbandet igen efter daglig rengöring av ärrret.

## Resultat efter behandling med Mepiform



Före behandling



Efter 6 månader



Före behandling



Efter 6 månader

**Observera.** Om uppluckrad hud eller klåda skulle uppkomma under Mepiform, avstå från behandlingen tills symtomen har försvunnit. Fortsätt därefter behandlingen genom att gradvis öka den tid förbandet sitter på. Om problemen kvarstår bör du kontakta din läkare. Mepiform bör ej användas på öppna sår.