

# Sådan bruges det aktive selvvarmende tæppe BARRIER® EasyWarm®+

## Rigtig brug



Åben pakken og fold tæppet helt ud **30 minutter** før brug



Start med at anvende tæppet **30 minutter** før operationen for at **holde kropstemperaturen**



Varmepuderne skal **vende opad**



Efter brug, **bortskaffes** tæppet som **almindeligt affald** (kan brændes)



Anvendes kun **under opsyn** af en sundhedsfaglig person



Patientens hud skal **tilses jævnlige**, især hvis der benyttes et tæppe oven på EasyWarm+



## Forkert brug



Må **ikke** anvendes på patienter med **stærkt nedsat perifer cirkulation\***



Fold **ikke** tæppet **dobbelt**



Placer **ikke** tæppet **under patienten**



Læg **ikke vægt** på tæppet og brug **ikke fikseringsstropper** ovenpå varmpuderne



Må **ikke** anvendes i forbindelse med **MR**. Kan **ikke** anvendes **under røntgen** på det område, der skal gennemlyses



Tæppet må **ikke** anvendes på børn og unge **under 18 år**

**Bemærk:** \*inkl. huden, f.eks.: svær hypotension, hvor længerevarende hypotension kan forventes, svær perifer vaskulær sygdom, aortakirurgi - distal krydsafklemning af aorta, svært nedsat hjertefunktion/kardiogenisk chok.



1. Riv pakken op ved det forskårne punkt i det øverste venstre hjørne. Tag tæppet ud af pakningen for at eksponere BARRIER® EasyWarm®+ for ilt og derved starte varmeprocessen.
2. Fold BARRIER® EasyWarm®+ helt ud og læg det ikke dobbelt. Tæppet varmer sig selv op til en gennemsnitstemperatur på 40°C på 30 minutter, når der kommer ilt til tæppet. Temperaturen opretholdes i op til 10 timer.
3. Placer BARRIER® EasyWarm®+ med puderne opad og den hvide side mod patienten. Tæppet er fleksibelt og designet til at passe til forskellige patient positioner, idet at det kan splittes i flere dele. Tæppets øvre og nedre del kan let splittes ved velcrobåndet. Den nedre del kan yderligere deles i to dele ved at klippe den ved den angivne linje.

## Nøglefordele

- Hjælper med at forebygge hypotermi i det perioperative miljø<sup>1</sup>
- Enkel og hurtig udpakning
- Enkel at bruge før, under og efter operationer
- Tæppet fungerer uden ekstra udstyr og skal ikke tilsluttes strøm

## Referencer:

1. Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® EasyWarm®, an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2013.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Molnlycke, BARRIER og EasyWarm varemærker, navne og logoer er registreret lokalt til en eller flere af virksomhederne i Molnlycke Health Care Group of Companies. ©2019 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0161804

  
**Molnlycke®**