



Mepore® IV

Transparent, åndbar IV-filmbandage

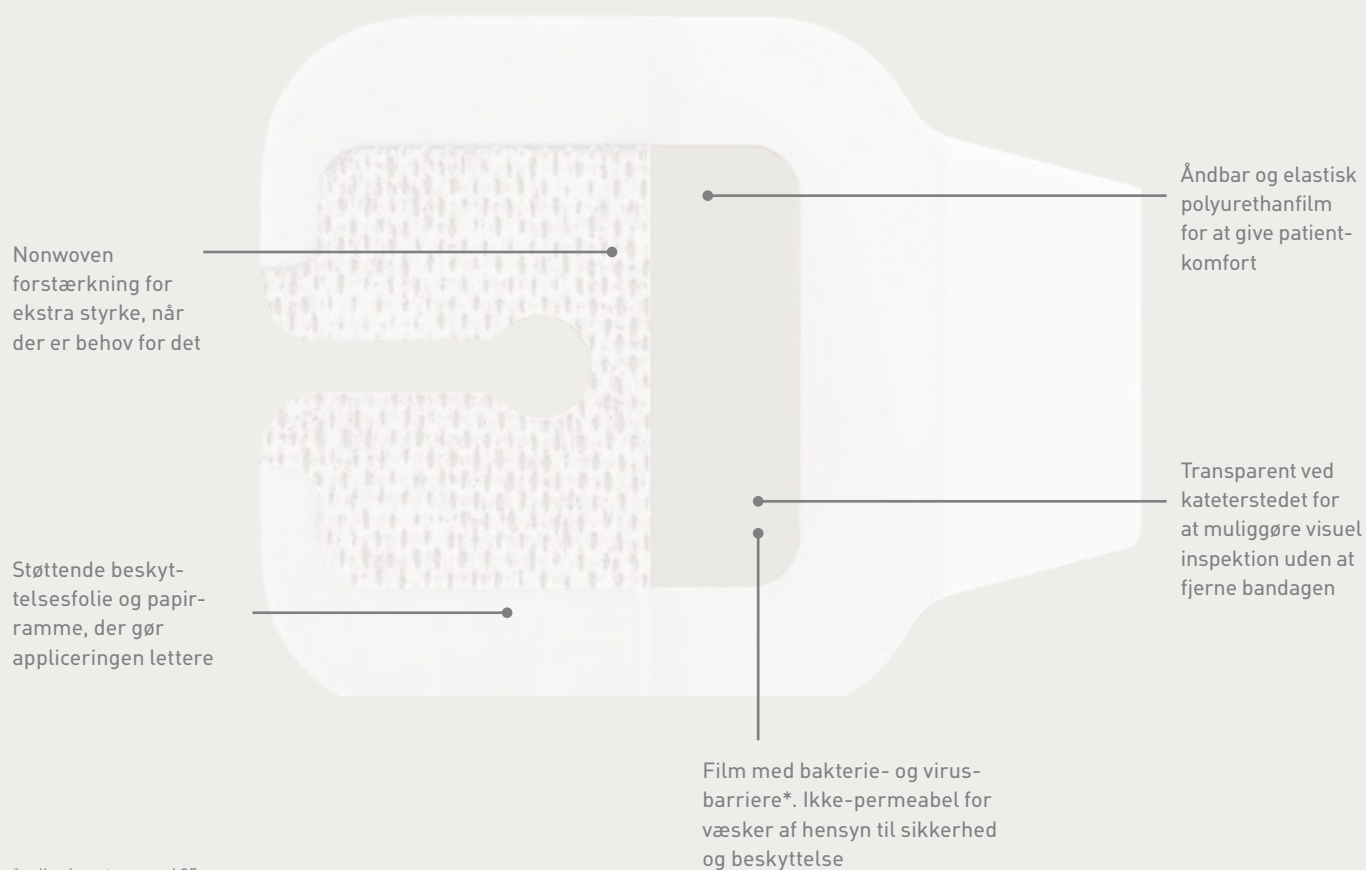


Mepore® IV er en transparent, selvklæbende IV-filmbandage, der er ideel til fiksering af intravaskulære enheder, f.eks. IV-katetre og andre intravaskulære katetre. Mepore IV's appliceringssystem er designet til at være let at anvende.


Sådan anvendes Mepore® IV

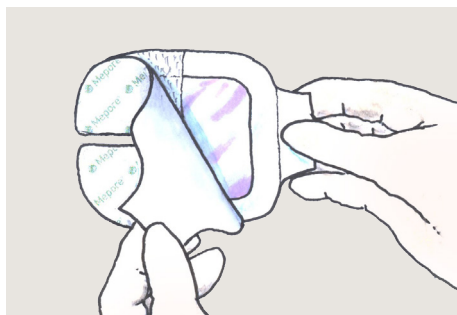

1. Åbn pakken og tag bandagen ud. Hold bandagen i sideflappen og tag bagsidepapiret af.

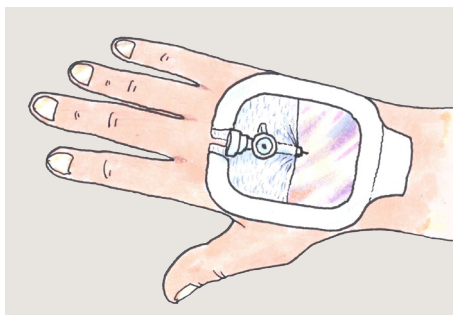

2. Sørg for, at huden er ren og tør, før du applicerer bandagen. Anbring bandagen over katetret. Kontrollér, at indstiksstedet er dækket af den transparente film.

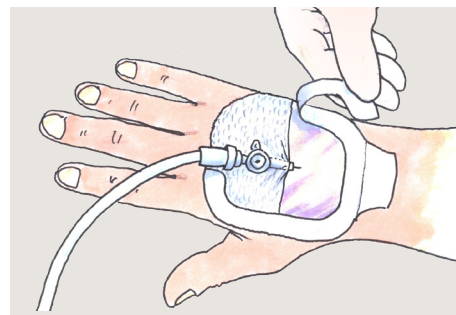

3. Fjern papirrammen. Udglat bandagen for at opnå optimal fiksering. Fjern sideflappen. Stræk ikke bandagen, når du applicerer den.

Sådan virker Mepore IV

Mepore IV giver en sikker og fleksibel fiksering af intravaskulære enheder. Den transparente film med bakterie- og virusbarriere minimerer risikoen for gennemtrængning og udefrakommende kontaminering. Takket være den høje fugtpermeabilitet muliggør Mepore IV transport af overskydende fugt væk fra huden. Nonwoven forstærkning giver ekstra styrke og pålidelig fiksering.

Polyakrylat-klæben er designet til at være mild mod huden samtidig med, at den sørger for sikker fiksering.

Appliceringssystemet med beskyttelsesfolie, papirramme og praktisk sideflap sikrer nem applicering.

Anvendelsesområder

Mepore IV er beregnet til fiksering af intravaskulære enheder, f.eks.:

- IV-katetre
- Perifere katetre
- Centrale katetre
- Pædiatriske katetre

Fordele ved Mepore IV

- Pålidelig og sikker fiksering
- Hudvenlig klæb
- Nonwoven forstærkning for ekstra styrke
- Åndbar
- Transparent for at tilse indstiksstedet
- Tilpasser sig nemt efter kropskonturerne
- Film med bakterie- og virusbarriere*
- Ugennemtrængelig for væske
- Nem applicering, også med handsker på

* mikrober større end 25 nm

Forholdsregler

Respiratorer bør ikke fikseres med Mepore IV. Mepore IV bør ikke erstatte suturer eller andre primære sårlukningsmetoder.



Mepore IV, er pakket sterilt i enkeltpakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk./trp.krt.
274000	5,5 x 5	100	600
274200	8 x 9	70	210
274400	10 x 11	70	210

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke og Mepore IV varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0391811


Mölnlycke®