


Mepore® Film & Pad

Pansement chirurgical respirant,
transparent et absorbant

- L'**adhésif doux** pour la peau assure une fixation solide et délicate

- Le **tampon ultra absorbant**, doté d'une couche de contact hypoadhérente, améliore le confort et la durabilité du pansement

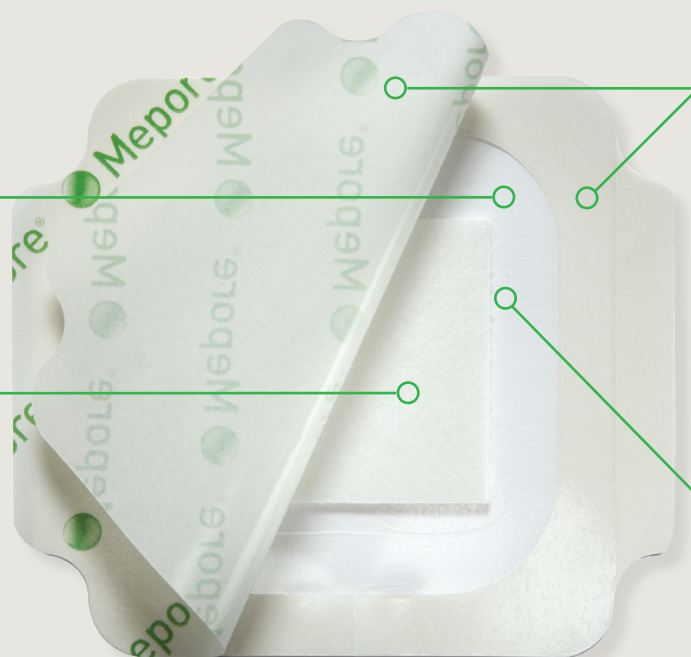

Le **support de papier métallique** sur **cadre de papier** facilite l'application aseptique


- La pellicule transparente, respirante, imperméable et confortable crée un milieu optimal pour la cicatrisation
- La pellicule à l'épreuve des virus, des bactéries et des liquides, garantit sécurité et protection

- Mepore® Film & Tampon est à l'épreuve des bactéries, des virus et de l'eau, pour la protection du patient et du clinicien. Flexible et semi-perméable, sa couche de contact est hypoadhérente et son adhésif respecte la peau. C'est un pansement à l'efficacité et au confort optimaux.

Mepitel® Film & Pad


Mölnlycke®

Application de Mepore Film & Tampon

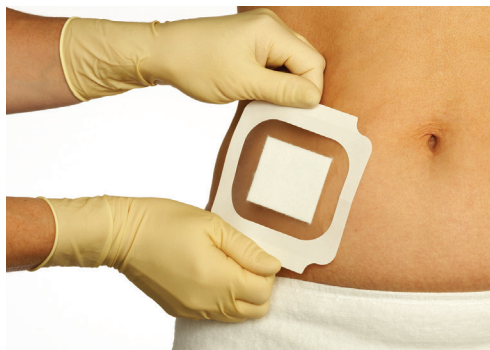

Nettoyer délicatement la plaie, assécher le pourtour. Retirer le film antiadhérent pour exposer le tampon et l'adhésif. Poser le pansement sur la plaie.



Lisser délicatement pour fixer le pansement. Retirer le cadre de papier et les deux onglets blancs.



Vérifier la bonne adhérence des bords.

Mode d'action de Mepore® Film & Tampon

Mepore® Film & Tampon est constitué d'un tampon ultra absorbant et d'une pellicule très perméable à la vapeur d'eau. Facile à manipuler, il procure une couverture flexible, transparente et absorbante des plaies et épouse bien les formes du corps. L'adhésif de polyacrylate respecte la peau tout en assurant une fixation solide.

Indications*

Mepore® Film & Pad est indiqué dans le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives telles que les plaies chirurgicales, coupures et dermabrasions.

Fréquence des pansements

L'état de la plaie dicte la fréquence des pansements.

Précautions*

- Mepore® Film & Tampon ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie connue aux adhésifs acryliques.
- Éviter de créer des tensions cutanées lors de l'application du pansement qui pourraient entraîner des lésions mécaniques.
- La plaie doit être contrôlée pour vérifier l'apparition éventuelle de signes cliniques d'infection (douleur, rougeur, suintement, odeur inhabituelle). En cas d'infection, le maintien de Mepore® Film & Tampon nécessite l'avis d'un professionnel de santé.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.
- En cas de réutilisation l'efficacité du produit peut être altérée et une contamination croisée peut survenir.

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Avantages de Mepore® Film & Tampon

- Couche de contact hypoadhérente
- Pouvoir respirant élevé
- Excellente absorbivité
- S'applique facilement avec des gants
- Épouse les formes du corps
- À l'épreuve de l'eau et des bactéries
- Fixation délicate et solide
- Imperméable à l'eau et autres liquides

Sélection Mepore® Film & Tampon

N° réf	Hors-tout (cm)	Tampon (cm)	Qté/boîte	Qté/caisse
275100	4 x 5	1,5 x 2,5	85	340
275200	5 x 7,Ovale	2,5 x 4	85	340
275300	5 x 7	2,5 x 4	85	340
275400	9 x 10	4,5 x 5	30	180
275500	9 x 15	4,5 x 10	30	240
275600	9 x 20	4,5 x 15	30	240
275700	9 x 25	4,5 x 20	30	150
275800	9 x 30	4,5 x 25	25	125
275900	9 x 35	4,5 x 30	25	100

