

Tubigrip™

Bandage tubulaire polyvalent



- Soutien confortable et efficace des tissus
- S'enfile rapidement et facilement
- Gamme complète de tailles pour toutes applications
- Ne nécessite ni épingles ni ruban de fixation
- Lavable et réutilisable

Tubigrip™


Mölnlycke®

Application



1. Découper une double longueur de Tubigrip pour le membre, en laissant 2 à 3 cm de plus pour le chevauchement.



2. Tirer le bandage Tubigrip comme un bas sur le membre.



3. Doubler Tubigrip sur le membre. S'assurer que le bord supérieur dépasse de 2 à 3 cm la première couche.

Mode d'action de Tubigrip

Tubigrip procure un soutien durable et efficace et une liberté complète de mouvements. Le filet élastique épouse les contours du corps et répartit la pression uniformément sur la surface. Ajustement rapide et simple. Tubigrip réduit le gaspillage - seulement la quantité exacte requise est utilisée. Faire chevaucher à 2-3 cm. Lorsqu'utilisé comme double couche sur le membre de taille appropriée, le bandage Tubigrip exerce une pression de 10 à 15 mm de mercure sur le membre.

Indications*

Tubigrip soutient les entorses et les foulures, les blessures aux tissus mous, l'œdème général, la cicatrisation post-brûlure et les blessures à la cage thoracique - aussi utilisé comme pansement compressif et pour immobiliser le bras.

Précautions*

Contient du latex de caoutchouc naturel. Si votre état se dégrade, cessez les applications et consultez un professionnel de la santé.

Sélection Tubigrip - 10 M/boîte

No article	Format	Largeur du produit (cm)	Usage	Taille de membre (cm)
1435	A	4,2 à 4,8	Pieds et les bras d'un bébé	10 à 12,5
1436	B	6,0 à 6,4	Petits bras et mains	12,5 à 15
1443	C	6,6 à 7,2	Bras moyens, petites chevilles	15 à 24,5
1437	D	7,3 à 7,9	Gros bras, chevilles moyennes, petits genoux	24,5 à 35,5
1434	E	8,7 à 9,2	Grosses chevilles, genoux moyens, petites cuisses	35,5 à 45
1438	F	9,7 à 10,3	Gros genoux, cuisses moyennes	45 à 50,5
1439	G	11,3 à 12,7	Grosses cuisses	50,5 à 60,7
1440	J	17,4 à 19,3	Petits troncs	60,7 à 73

Mise en garde : Contient du latex naturel.

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care et Tubigrip™ sont déposés partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.




Mölnlycke®

CFWC00761905