

INSTRUÇÕES DE USO

Exufiber®

Nome Técnico: Curativo

Nome Comercial: Exufiber®

Modelos: 603300 Exufiber 5x5cm, 603301 Exufiber 10x10cm, 603302 Exufiber 15x15cm, 603308 Exufiber 2x45cm.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”

“Não contém látex”

“Fabricante recomenda uso único”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por Embalagem Secundária
603300	Exufiber 5x5cm	10
603301	Exufiber 10x10cm	10
603302	Exufiber 15x15cm	10
603308	Exufiber 2x45cm	5

Descrição do Produto

Exufiber é um curativo estéril de não-tecido fabricado em fibras de álcool polivinílico altamente absorventes. Em contato com o exsudato da ferida, Exufiber transforma-se num gel que ajuda na cicatrização úmida da ferida e facilita a remoção para troca do curativo. Exufiber absorve e retém o exsudato da ferida.

Exufiber está disponível sob as formas de placa de curativo plano e fita.

Indicação de Uso

Os curativos para feridas Exufiber destinam-se a ser utilizados numa grande variedade de feridas com exsudato:

- Úlceras da perna e do pé;
- Úlceras por pressão;
- Queimaduras de segundo grau;
- Feridas cirúrgicas;
- Áreas doadoras de pele;
- Feridas malignas.
- Lesões Dérmicas e outras feridas externas causadas por trauma

Instruções de utilização

Feridas pouco profundas Aplicação:

1. Lave a ferida com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica.
2. Seque bem a pele circundante.
3. Escolha o tamanho certo de curativo para cobrir toda a ferida. Para obter os melhores resultados, Exufiber deve sobrepor a pele seca circundante em, no mínimo, 1-2 cm para tamanhos de curativos menores (até 10x10 cm) e 5 cm para tamanhos de curativos maiores.

O curativo encolherá à medida que absorve o fluido da ferida e começa a gelificar.

4. Aplique um curativo Exufiber seco sobre a ferida.
5. Fixe com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudato.

www.molnlycke.com.br

6. É possível usar terapia de compressão em conjunto com Exufiber.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber quando atingir a saturação. Exufiber pode ser deixado local durante até 7 dias, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.
2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Feridas profundas e cavidades

Aplicação:

1. Lave a ferida com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica.
2. Seque bem a pele circundante.
3. Encha a ferida sem forçar com o produto em curativo ou fita, deixando espaço para que o curativo inche. Ao utilizar curativo em fita, corte o comprimento apropriado deixando uma ponta de 2-3 cm fora da ferida para fácil remoção.
4. Cubra com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudato.
5. Fixe (ou cubra) com um curativo adesivo ou ligadura, conforme for apropriado.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber quando atingir a saturação. Exufiber pode ser deixado local durante até 7 dias, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.
2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Área doadora de pele

Aplicação:

1. Colha o tecido e assegure a hemostase (conforme a rotina normal).
2. Escolha o tamanho certo de curativo para cobrir toda a ferida. O curativo Exufiber deve sobrepor-se, pelo menos, 5 cm sobre a pele circundante seca. O curativo encolherá à medida que absorve fluido da ferida e começa a gelificar.
3. Aplique um curativo Exufiber seco sobre a ferida.
4. Cubra com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudato.
5. Fixe (ou cubra) com um curativo adesivo ou ligadura, conforme for apropriado.

Mudança e remoção do curativo:

1. Mude o curativo Exufiber quando atingir a saturação. Exufiber pode ser deixado no local durante até 14 dias em áreas doadoras, dependendo da condição da ferida ou conforme indicado pela prática clínica.
2. Retire o curativo secundário e descarte-o da forma apropriada.
3. Retire o curativo Exufiber lavando/enxaguando suavemente com solução salina ou água, de acordo com a prática clínica padronizada. Qualquer material não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.

Precauções, Advertências e Contra-Indicações

- Exufiber é um produto de uso único e não deve ser reutilizado. A reutilização pode conduzir à deterioração do produto ou poderá ocorrer contaminação cruzada.
- É garantida a esterilidade a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada antes da utilização. Não reesterilizar.
- Todas as feridas devem ser inspecionadas com frequência. Em caso de sinais de infecção clínica, consulte um profissional de saúde de modo a obter o tratamento adequado para a infecção.
- Exufiber não se destina a feridas secas, lesões de espessura completa ou implantes cirúrgicos.
- No caso de o curativo secar e ser difícil de remover, deve ser umidificado de acordo com as práticas locais (por exemplo com solução salina estéril ou água estéril), deixando-se embeber até ser facilmente levantado. Pode demorar vários

minutos para que o Exufiber se transforme em gel. Retire o curativo lavando/enxaguando suavemente.

Armazenamento e Transporte

Deve ser guardado em condições secas e temperatura ambiente entre 15°C e 35°C. Proteger da luz solar direta

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem

REGISTRO ANVISA: 80733280019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP
CEP: 06696-060
CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080,
Goteborg, SE-402 52 - Suécia
Fabricado no Reino Unido