

## INSTRUÇÕES DE USO

### Mepitac®

**Nome Técnico:** Esparadrapos e Fitas Adesivas

**Nome Comercial:** Mepitac®

**Modelos:** Mepitac 2cm x 3m, Mepitac 4cm x 1,5m

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:**  
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:**  
**(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico não estéril”

“Fabricante recomenda uso único”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

### APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

<b>Código do Produto</b>	<b>Produto e Dimensão</b>	<b>Quantidade por embalagem secundária</b>
298300	MEPITAC 2cm x 3m	1
298400	MEPITAC 4cm x 1,5m	1

### **Composição**

- 1 - Parte externa: filme de poliuretano
- 2 - Camada secundaria: adesivo de poliacrilato
- 3- Camada intermediaria: poliéster e poliamida
- 4- Parte que entra em contato com a pele: camada fina de silicone
- 5 - Película protetora: filme de polietileno

### **Mepitac**

O Mepitac é um adesivo muito adaptável, fácil de aplicar e de retirar. O Mepitac pode ser levantado e depois voltado a colocar se for necessário observar o seu local de aplicação. A camada de silicone Safetac constitui uma fixação suave mas segura e assegura uma remoção atraumática da pele e zonas com pelo. O Mepitac não deixa resíduos.

O Mepitac é a fixação ideal para pacientes com pele frágil e sensível.

O Mepitac é adequado para pacientes que requerem aplicações e remoções frequentes sobre a mesma área, por exemplo, neonatos, ostomia e pacientes em diálise.

O Mepitac é resistente a água.

### **Indicação de Uso**

O Mepitac está desenhado para a fixação de instrumentos médicos como drenos, tubos, eletrodos, cânulas IV, e curativos em pacientes. Além disso o Mepitac oferece uma proteção suave quando é utilizado sob instrumentos.

### **Modo de utilização**

1. Assegure-se que a pele esta limpa, seca e sem creme.



2. Corte a quantidade desejada utilizando uma tesoura.
3. Retire o papel protetor e aplique o Mepitac sem esticar.
4. Se for necessário inspecionar a área pode-se retirar o Mepitac e voltar a colocar.

### **Precauções, Advertências e Contra-Indicações**

Se o produto for reutilizado, pode deteriorar-se, e a contaminação cruzada pode ocorrer.

As propriedades adesivas do Mepitac podem diminuir quando este for utilizado em condições úmidas tais como incubadoras ou pacientes com febre ou que transpirem muito.

Não utilizar o Mepitac em cateteres ou cânulas arteriais.

### **Condições de Armazenamento e Transporte**

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Transportar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

### **Descarte**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

**DATA DE FABRICAÇÃO:** Vide embalagem

**VALIDADE:** Vide embalagem.

**REGISTRO ANVISA:** 80733280004

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

### **IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Av. Portugal, nº 1100, Parte C-43, Bairro Itaquí

**CEP:** 06696-060

**E-MAIL:** kaynara.cordeiro@molnlycke.com



**CNPJ:** 12.600.168/0001-17

ITAPEVI / SP

**Fabricante Legal:**

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402  
52 – Suécia

Fabricado na Finlândia