

BARRIER® Extremitetslakan - bilateralt ben med Drisite® Plus




- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att drapera
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet



1. Vik ut instrumentbordslakanet och placera det under patientens ben.



2. Placera det utvikta extremitetslakanet över patientens fötter med anvisningsetiketten uppåt mot patientens kropp.

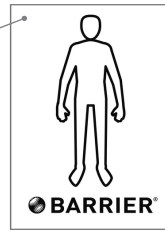

3. För in händerna genom den elastiska öppning och ta tag i patientens fötter. Vik ut lakanet över fotändan på op. bordet och sedan uppåt.



4. Vik ut operationslakanet övre del över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd/Trp
60301	Extremitetsset, bilateralt ben: 4 x Cellduk 2 x Op-tejp 1 x Bilateralt benlakan, elastiskt hål 7cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	18 x 25cm 9 x 49cm 200 x 300cm 150 x 190cm	75 x 190cm	7 / 14

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70313	Bilateralt benlakan, elastiskt hål 7cm	200 x 300cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0381803