

BARRIER® Vertikallakan



- Integrerad vätskeuppsamlingspåse för effektiv vätskehantering
- Integrerat töjbart klister för säker fastsättning

- Optimal vikning för aseptisk hantering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet



1. Håll lakanet mot patienten på det sätt som framgår av instruktionsetiketten.



2. Ta bort skyddspapperet och observera pilens riktning.



3. Placera incisionsfilmen på patienten.



4. Vik först ut lakanet uppåt och nedåt, och därefter åt vänster och höger.



5. Fixera den självhäftande kanten över bågen mot baksidan av lakanet.



6. Öppna vätskeuppsamlingspåsen och anslut sugslangen till ventilen vid behov.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiionsyta	Avd./Trp.
903016	Vertikallakanet: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Vertikallakan, incisionsfilm 40 x 30cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 330 x 240cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	6 / 12
903026	Vertikallakanet: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Vertikallakan, incisionsfilm 86 x 25cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 330 x 240cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	4 / 8
903014	Vertikallakanet: 4 x Cellduk 1 x Vertikallakan, incisionsfilm 40 x 30cm 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	18 x 25cm 330 x 240cm 150 x 190cm	75 x 190cm	7 / 14
826010	Vertikallakan, incisionsfilm 86 x 25cm	330 x 240cm		7 / 14
826020	Vertikallakan, incisionsfilm 40 x 30cm	330 x 240cm		10 / 20
80000527	Vertikallakan, incisionsfilm 60 x 30cm	320 x 240cm		10 / 20

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
815300	Vertikallakan, incisionsfilm 86 x 25cm	330 x 240cm
815301	Vertikallakan, incisionsfilm 40 x 30cm	330 x 240cm
80008032	Vertikallakan, incisionsfilm 60 x 30cm	320 x 240cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0341803

Mölnlycke®